

Hinweise zur Lagerung und Reinigung der sanowell Haftpuffer:

- Lagern Sie die sanowell Haftpuffer, wenn möglich, unverpackt an einem kühlen und trockenen Ort, ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Die Haftpuffer dürfen nicht in verschlossenen PE-Beuteln oder anderen luftdicht versiegelten Behältnissen aufbewahrt werden!
- Reinigen Sie die Haftpuffer bei Verschmutzungen mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Lappen. Anschließend mit klarem Wasser gut nachspülen und trocknen lassen.
- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger, da diese den Kunststoff beschädigen können!
- Haftpuffer niemals mit öligen Substanzen reinigen, da dieses die Haltbarkeit beeinträchtigt!

Achtung!

Bitte geben Sie diese Hinweise auch an Ihre Kunden weiter und händigen Sie diesen die, dem Produkt beiliegende, Gebrauchsanweisung aus.

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung – insbesondere bei Nichtbeachtung dieser Lagerungs- und Reinigungshinweise – entstehen, erlischt die Garantie.



hofmann gmbh
frankenstraße 16
63776 mömbris

fon: 0 60 29 · 99 89 · 0
fax: 0 60 29 · 99 89 · 29
e-mail: hallo@hofmanngmbh.de
www.sanowell.com