

## Hinweise zur Lagerung und Reinigung der sanowell Haftpuffer:

- Lagern Sie die sanowell Haftpuffer, wenn möglich, unverpackt an einem kühlen und trockenen Ort, ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Die Haftpuffer dürfen nicht in verschlossenen PE-Beuteln oder anderen luftdicht versiegelten Behältnissen aufbewahrt werden!
- Reinigen Sie die Haftpuffer bei Verschmutzungen mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Lappen. Anschließend mit klarem Wasser gut nachspülen und trocknen lassen.
- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger, da diese den Kunststoff beschädigen können!
- Haftpuffer niemals mit öligen Substanzen reinigen, da dieses die Haltbarkeit beeinträchtigt!

### **Achtung!**

**Bitte geben Sie diese Hinweise auch an Ihre Kunden weiter und händigen Sie diesen die, dem Produkt beiliegende, Gebrauchsanweisung aus.**

**Bei Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung – insbesondere bei Nichtbeachtung dieser Lagerungs- und Reinigungshinweise – entstehen, erlischt die Garantie.**



**hofmann gmbh**  
frankenstraße 16  
63776 mömbris

fon: 0 60 29 · 99 89 · 0  
fax: 0 60 29 · 99 89 · 29  
e-mail: hallo@hofmanngmbh.de  
www.sanowell.com